

Skift af støvsugerposer og nulstilling af timer HELIUS 22 og HELIUS 40

Hvis der er en kunde der ringer ind vedr. at FC vises på display, er det fordi at støvsugerposen skal skiftes. Denne meddelelse kommer op på skærmen hver gang maskinen har kørt i 50 timer med sugetilstand.

Når kunden har skiftet støvsugerposen, skal denne timer nulstilles. Det gøres gennem at man slukker maskinen, og derefter trykker på knap (2). Knap (2) holdes nede i fem sekunder, indtil der står FC på skærmen. Derefter kan kunden køre med maskinen normalt!

